

# Effektiv behandling av demodexinflammation

## BEHANDLING

Behandling av demodexinflammation i ögonlocken kräver specialprodukter då vanliga rengöringsprodukter inte minskar antalet kvalster.

BLEPHADEMODEX våtservetter innehåller den mest aktiva substansen från Tea Tree Oil samt återfuktande hyaluronsyra. Detta ger en effektiv och samtidigt skonsam behandling av


demodexinflammation. Beroende på hur svåra dina besvär är, kan du behöva behandla en eller två gånger om dagen i fyra veckor. Vid milda besvär, behandla en gång om dagen på kvällen. Vid medelsvåra till svåra besvär, behandla morgon och kväll, alternativt enligt rekommendation från din läkare eller optiker.

## INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING

1. Öppna förpackningen och veckla ut servetten.
2. Placera servetten på toppen av pekfingeret och vira den runt fingertoppen.
3. Stäng ögat och håll det stängt. Lägg fingret med servetten mot ögonlocket och massera försiktigt med små cirkulära rörelser för att rengöra basen av ögonfransarna (övre och nedre) och få bort krustor, mjäll och sekret.
4. Ta en ny servett och upprepa på andra ögat.



Efter den fyra veckor långa behandlingen med BLEPHADEMODEX rekommenderas att du fortsätter att göra rent dina ögonlock dagligen. BLEPHACLEAN som finns på apotek och utvalda optiker fungerar då utmärkt som underhållsbehandling.

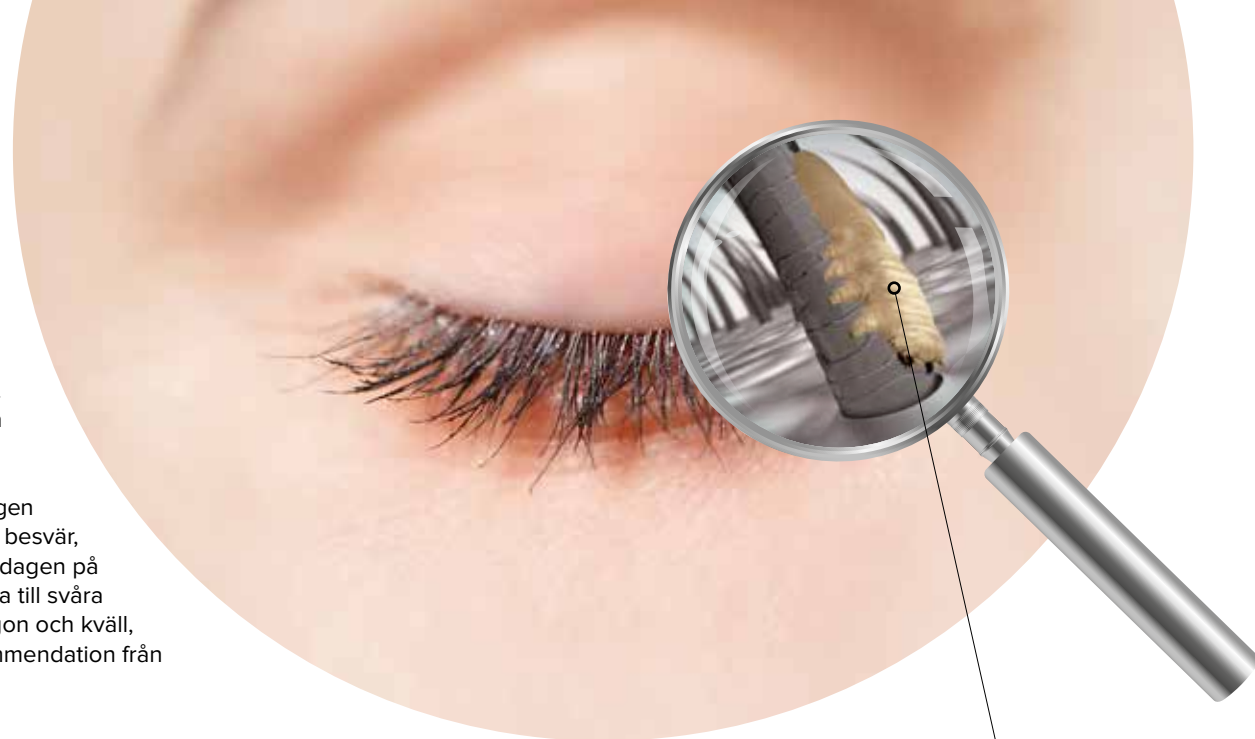

## BLEPHADEMODEX för effektiv behandling av demodexinflammation



Théa är ett franskt familjeföretag och en pionjär inom ögonhälsa sedan 150 år. Med forskning och innovation i öppet utbyte med specialister i hela världen utvecklar vi teknik och behandlingar som ska göra det möjligt för alla att se världen med öppna ögon. Let's open our eyes.

För mer information: [www.blepha.se](http://www.blepha.se)

 **Théa**  
let's open our eyes

 **Théa**

# Vad säger experten?

## VAD ÄR DEMODEX?

Demodex anses vara den vanligaste ekto-parasiten hos människan. Detta kvalsterdjur, 0,2–0,4 mm långt, lever bl. a i hårsäcken i ögonfransar och i ögonbryn, i Meiboms körtlar och i talgkörtlar på huden. Det finns ett hundratal kända arter, varav två lever på människan, Demodex folliculorum och Demodex brevis. Vanligtvis orsakar de inga större besvär, men hos en del människor ökar antalet, vilket stör balansen på hud och i körtlar och kan leda till inflammation i ögonlock och på ögats yta. Prevalensen av Demodexkolonisering ökar med åldern och når nästan 100% hos personer över 70 år.

## VILKA SYMPTOM KAN MAN FÅ?

De vanligaste ögonsymtomen är främmande kroppkänsla och klåda, men även torra och irriterade ögon, röda ögonlockskanter med skorpbildning, dimsyn, felväxande ögonfransar eller förlust av ögonfransar kan förekomma.

## NÄR KAN MAN MISSTÄNKTA DEMODEX?

Fynd av så kallade collaretter (cylindriska mjäll), vid basen av ögonfransarna, är ett tecken på att patienten har Demodex. Ju fler collaretter, desto större sannolikhet för kliniska besvär. Återkommande vaglar, blefariter eller konjunktiviter kan tala för Demodex. I huden i övrigt ses Demodex ofta i samband med Rosacea.



## CLAES SCHUBORG

Ögonläkare/ögonkirurg. Verksam som överläkare och specialist på hornhinn sjukdomar och torra ögon vid Guldhedskliniken i Göteborg. Tidigare mångårig medarbetare på ögonkliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.


## HUR BEHANDLAR MAN?

Det primära målet är att reducera överväxten av Demodex och därigenom minska inflammationen. Detta har visat sig kunna uppnås med TERPINEN-4-OL, det renade extraktet från tea tree oil, som anpassats så att det går att använda i närheten av ögats slemhinna.

## HUR LÄNGE MÅSTE MAN BEHANDLA?

För att behandlingen ska vara framgångsrik bör man efter 30 dagars behandling med BLEPHADEMODEX, som innehåller TERPINEN-4-OL, fortsätta att regelbundet hålla ögonlocken rena, t ex med BLEPHACLEAN.

Våtservetterna innehåller den mest aktiva substansen från Tea Tree Oil samt återfuktande hyaluronsyra som gör behandling mer behaglig. Stora servetter underlättar användning. Blephademodex minskar effektivt antalet cylindriska mjäll.

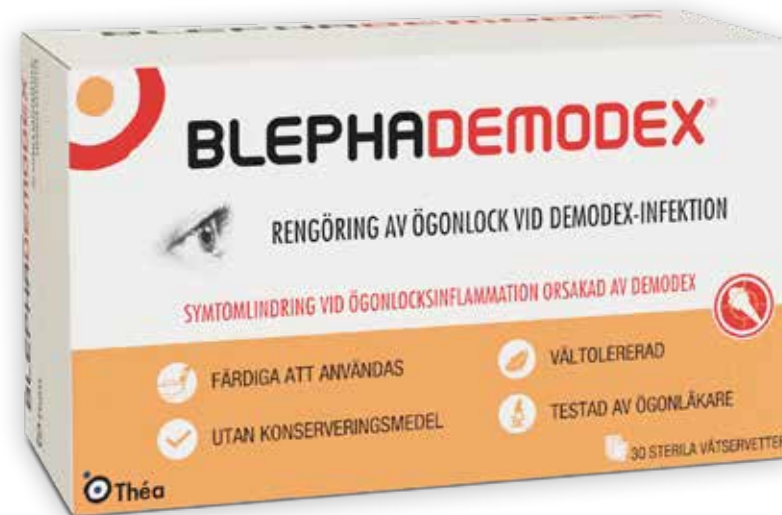

BLEPHADEMODEX effektiva våtservetter är:

- Enkla att använda
- Snälla mot ögonen
- Fria från konserveringsmedel



## VID BLEFARIT

90% av patienter med kronisk blefarit har ett överskott av Demodex.




## VID ROSACEA

58,5% av patienter med rosacea blefarit har ett överskott av Demodex.



## SYMTOMLINDRING

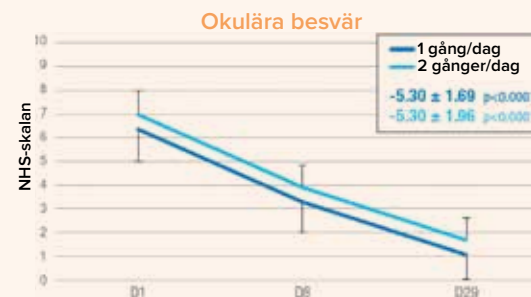

Samtliga okulära symtom (klåda, brännande känsla, sveda, klubbiga ögon på morgonen, fluktuerande suddig syn, ljuskänslighet och främmande kropp känsla) som kan kopplas samman med demodexinflammation förbättrades vid användning av Blephademodex. Effekt redan efter en vecka.