

Effektiv behandling av demodexinflammation

BEHANDLING

Behandling av demodexinflammation i ögonlocken kräver specialprodukter då vanliga rengöringsprodukter inte minskar antalet kvalster.

BLEPHADEMODEX våtservetter innehåller den mest aktiva substansen från Tea Tree Oil samt återfuktande hyaluronsyra. Detta ger en effektiv och samtidigt skonsam behandling av


demodexinflammation. Beroende på hur svåra dina besvär är, kan du behöva behandla en eller två gånger om dagen i fyra veckor. Vid milda besvär, behandla en gång om dagen på kvällen. Vid medelsvåra till svåra besvär, behandla morgon och kväll, alternativt enligt rekommendation från din läkare eller optiker.

INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING

1. Öppna förpackningen och veckla ut servetten.
2. Placera servetten på toppen av pekfingeret och vira den runt fingertoppen.
3. Stäng ögat och håll det stängt. Lägg fingret med servetten mot ögonlocket och massera försiktigt med små cirkulära rörelser för att rengöra basen av ögonfransarna (övre och nedre) och få bort krustor, mjäll och sekret.
4. Ta en ny servett och upprepa på andra ögat.



Efter den fyra veckor långa behandlingen med BLEPHADEMODEX rekommenderas att du fortsätter att göra rent dina ögonlock dagligen. BLEPHACLEAN som finns på apotek och utvalda optiker fungerar då utmärkt som underhållsbehandling.

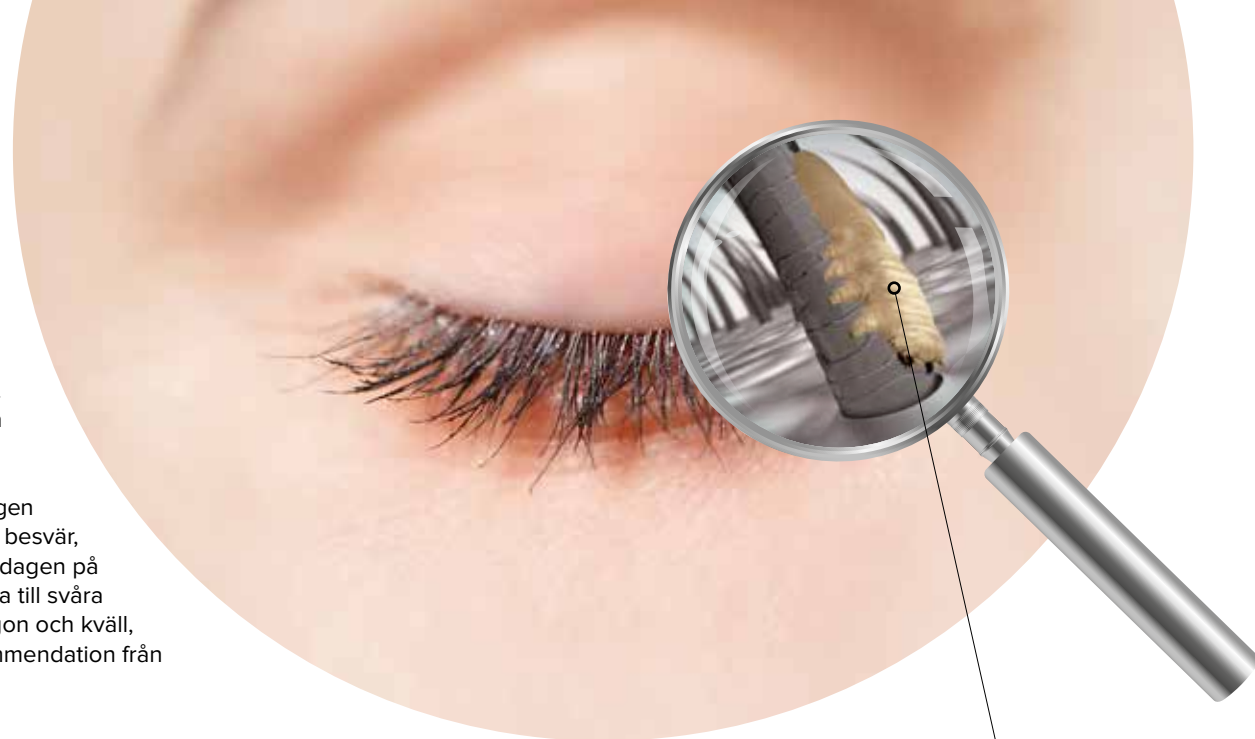

BLEPHADEMODEX för effektiv behandling av demodexinflammation



Théa är ett franskt familjeföretag och en pionjär inom ögonhälsa sedan 150 år. Med forskning och innovation i öppet utbyte med specialister i hela världen utvecklar vi teknik och behandlingar som ska göra det möjligt för alla att se världen med öppna ögon. Let's open our eyes.

För mer information: www.blepha.se

 **Théa**
let's open our eyes

 **Théa**

Vad säger experten?

VAD ÄR DEMODEX?

Små mikroskopiska kvalster som bland annat lever på huden. De flesta av oss har dem, men förekomsten ökar med stigande ålder och är något vanligare hos män. Vanligtvis orsakar de inga symtom, men hos vissa individer kan antalet öka, vilket stör balansen i hud och körtlar och kan leda till inflammation i ögonlocken ögats yta.

Det finns två olika kvalsterarter hos människan, Demodex folliculorum samt Demodex brevis. De kan leva i hudens talgkörtlar, i hårsäckar i ögonbryn och ögonfransar samt ögats oljebärande körtlar.

VILKA SYMTOM KAN MAN FÅ?

De vanligaste symtomen är, klåda, främmande kroppskänsla, förlust av ögonfransar, rinnande ögon, dimsyn, ögonirritation.

NÄR KAN MAN MISSTÄNKA DEMODEX?

Vid fynd av cylindriska mjäll vid basen av ögonfransarna, återkommande vaglar, blefarit och konjunktivit är Demodex vanligt. I huden i övrigt ses Demodex ofta i samband med Rosacea.

HUR BEHANDLAR MAN?

Med produkter som innehåller det renade extraktet TERPINEN-4-OL, huvudkomponenten i tea tree oil, som BLEPHADEMODEX.



FREDRIK KÄLLMARK

Medicine doktor, Leg.Opt, klinikchef, IRPL-certifierad, med mångårig erfarenhet från bl.a. St Eriks Ögonsjukhus samt som lektor och forskare vid Karolinska Institutet med torra ögon som specialitet.


Detta bekämpar inflammationen effektivt samtidigt som de gör behandling enklare och mer behaglig.

HUR LÄNGE MÅSTE MAN BEHANDLA?

En framgångsrik behandling vid demodexinflammation har två faser:

- En intensiv fas med en specifik behandling i 30 dagar innehållande TERPINEN-4-OL, som BLEPHADEMODEX.
- En underhållningsfas för fortsatt lindrande av besvär från symtom, med rengöring av ögonlocken, tex med BLEPHACLEAN.

Våtservetterna innehåller den mest aktiva substansen från Tea Tree Oil samt återfuktande hyaluronsyra som gör behandling mer behaglig. Stora servetter underlättar användning. Blephademodex minskar effektivt antalet cylindriska mjäll.

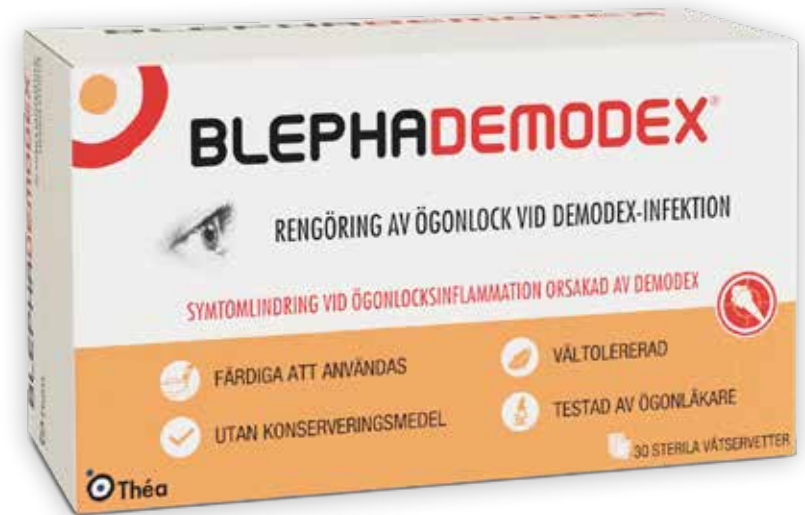

BLEPHADEMODEX effektiva våtservetter är:

- Enkla att använda
- Snälla mot ögonen
- Fria från konserveringsmedel



VID BLEFARIT

90% av patienter med kronisk blefarit har ett överskott av Demodex.




VID ROSACEA

58,5% av patienter med rosacea blefarit har ett överskott av Demodex.



SYMTOMLINDRING

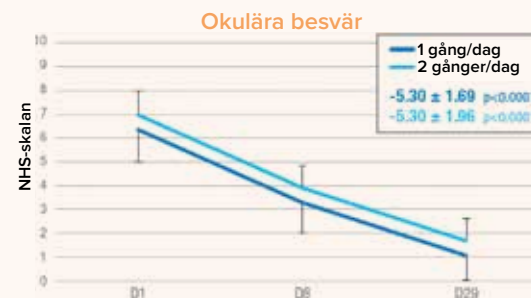

Samtliga okulära symtom (klåda, brännande känsla, sveda, klubbiga ögon på morgonen, fluktuerande suddig syn, ljuskänslighet och främmande kropp känsla) som kan kopplas samman med demodexinflammation förbättrades vid användning av Blephademodex. Effekt redan efter en vecka.