

SV

BLEPHACLEAN®

Detta är en medicinteknisk produkt.
Läs bipacksedeln före användning.
Spara denna information,
du kan behöva läsa den igen.

INDIKATION

BLEPHACLEAN är avsedd för daglig rengöring av ögonlocken. Endast för användning på huden. Ska inte användas i ögat.

LÄMPLIG FÖR

- Vuxna,
- Barn äldre än 3 månader: föräldrar eller annan vuxen ska administrera produkten.

KONTRAIKATIONER

Använd inte om du är allergisk mot något av innehållsämnen i BLEPHACLEAN (se Produktbeskrivning).

BLEPHACLEAN ska inte användas under graviditet eller amning utan rekommendation från läkare eftersom det saknas tillräckligt med data om användning vid graviditet och amning.

PRODUKTBeskrivning

BLEPHACLEAN är stenila servetter impregnerade med rengöringslotion och avsedda för daglig rengöring av ögonlocken. Rengöringslotjonen innehåller: Kapryloylglycin, natriumhyaluronat, PEG 8, poloxamer 184, polysorbitat 20, propylenglykol, hydrocotylextrakt (propylenglykol, Centella asiatica-extrakt och vatten), talgreglerande komplex utan konserveringsmedel (propylenglykol, rotextrakt från Iris florentina, zinksulfat, alkohol, natriumhydroxid eller saltsyra och vatten), PEG-6-kapryl/kaprinsyra-glycerider (d.v.s Makrogol-6-glycerolkaprylokaprat), dikaliumfosfat, natriumhydroxid, kaliumdivätefosfat, renat vatten. Färgen på servetterna kan variera. Detta är normalt på grund av de naturliga växtextrakten i rengöringslotjonen som servetten är impregnerad med.

NYTTA, EGENSKAPER OCH FUNKTION

BLEPHACLEAN är stenila våtservetter avsedda för daglig rengöring av ögonlocken, särskilt:

- om du har känslig hud, ögonlock eller ögon,
- om du behöver avlägsna damm, pollen och sekret från ögonlocken. Detta kan vara en del av din ögonvård när du är allergisk eller har en ögoninfektion,
- om du har en inflammation eller infektion i ögonlocken såsom blefarit (ögonlocksinfektion), dysfunktion i Meiboms körtlar (ögonlockskörtlarna), en vagel eller kronisk vagel. Dessa tillstånd kan orsaka symptom av torra ögon, såsom kliande, grusiga, ömma och/eller röda ögon,
- om du behöver rengöra dina ögonlock före ingrepp i ögonen, såsom terapeutiska injektioner i ditt öga (injektioner i glaskroppen) ögonlaseroperation (LASIK eller PRK) och operation för grå starr. Eftersom BLEPHACLEAN är väl tolererad kan den även användas efter operation enligt läkarens rekommendation.

BLEPHACLEAN rengör ögonlocken genom att avlägsna damm, pollen och sekret. BLEPHACLEAN är skonsam mot huden runt ögonen och respekterar den naturliga bakteriefloren. Produkten är testad av ögonläkare.

REKOMMENDATIONER VID ANVÄNDNING

Behandling:

Före ögonoperation, använd **två gånger dagligen** i 5 dagar, eller enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.

Vid annan behandling använd **två gånger dagligen** morgon och kväll i 3 veckor, och sedan en gång dagligen i 3 månader eller enligt läkarens, optikers eller apotekspersonalens anvisningar. Vissa ögonlocksbesvär är kroniska och du kan behöva fortsätta med rengöringen av ögonlocken under lång tid.

BLEPHACLEAN är lätt att använda.

Om du använder kontaktlinser: Ta bort kontaktlinserna före användning av BLEPHACLEAN.

Tvätta händerna noga före användning.

Öppna påsen genom att riva av kanten (Bild 1) och veckla ut rengöringsservetten. Använd inte sax eller dylikt för att öppna påsen.



Bild 1: Öppning av påsen.

Vira servetten runt toppen av pekningret.

Håll ögat stängt och placera servetten varsamt på ögonlocken och roten av fransar (Bild 2).

Massera ögonlocken försiktigt med små cirkulära rörelser och ta bort eventuella skorper, sekret eller make-up.



Bild 2: Rengöring av ögonlocken och fransarna.

Framför en spegel, dra försiktigt ned ögonlocket med den andra handen. Rengör sedan försiktigt den nedre ögonlockskanten genom att dra servetten (vriad runt fingret) fram och tillbaka.



Bild 3: Rengöring av ögonlockskanten.

Upprepa behandlingen på det andra ögat med en ny servett. Man behöver inte skölja efter användning av BLEPHACLEAN servett.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Kontrollera att förpackningen är obruten innan du använder för första gången: använd endast om påsen är oöppnad.

Använd varje servett en gång eftersom den vid återbruk kan ha mindre effekt och orsaka kontamination (risken för infektion ökar). Kontakta hälso- och sjukvårdspersonal om dina symptom inte blir bättre eller förvärras.

VARNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Undvik att få BLEPHACLEAN i ögat. En brännande känsla kan upplevas om BLEPHACLEAN kommer i ögat. Om detta sker ska ögat sköljas med steril vatten eller saltlösning.

BIVERKNINGAR

Följande biverkning är rapporterad vid användning av BLEPHACLEAN: brännande eller kliande känsla under några minuter efter användning, rödhet i ögonlocken eller svullna ögonlock, allergisk reaktion.

Om biverkningar förekommer, ska kontaktlinsanvändare inte sätta tillbaka kontaktlinserna.

Om du får någon biverkning eller upplever något oväntat efter att du använt denna produkt, tala med hälso- och sjukvårdspersonal och rapportera händelsen till den lokala distributören, tillverkaren eller den nationella hälsomyndigheten (se kontaktinformation i slutet av bipacksedeln).

FÖRVARING OCH BORTSKAFFANDE

Förvaras mellan 8 °C och 25 °C.

Produkten ska skyddas mot direkt solljus och fukt.

Släng servetten direkt efter användning.

Använd inte efter utgångsdatum som är angivet på påsen och yttre kartongen.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad och avser produkt i oöppnad förpackning som är korrekt förvarad.

Produkten bör kasseras ansvarsfullt enligt gällande riktlinjer (påsen ska sorteras som hushållsavfall, den yttre kartongen och bipacksedeln kan återvinnas).

Bipacksedelns versionsnummer och revideringsdatum:

Ver. 5 08/2022

Tillverkare:

Laboratoires Théa
12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2
Frankrike

www.laboratoires-thea.com

Avsnitt « Contact us »

SV

Distributör: Théa Nordic AB, Storgatan 55, 70363 Örebro
www.thea-nordic.com

Hälsomyndighet:

Inspektionen för vård och omsorg

Box 45184, 104 30 Stockholm

Tel. 010-788 50 00

e-post: registrator@ivo.se – www.ivo.se

Läkemedelsverket

Box 26, 751 03 Uppsala

Tel: 018-17 46 00, fax: 018-50 31 15

e-post: meddev.central@mpa.se – www.lakemedelsverket.se

CE 0459

FÖRKLARING TILL SYMBOLERNA PÅ FÖRPACKNINGEN

	Tillverkare		Batchnummer
	Tillverkningsdatum		Utgångsdatum
	Förvarings-temperatur		Steriliserad med strålning
	Medicinteknisk produkt		Läs bipacksedeln
	Engångsbruk		Använd inte om förpackningen är skadad
	Varning		Skyddas mot solljus
	Förvaras torrt		Unik enhetsidentifierare
	REF 1179LG20L27	Katalognummer	

Théa

N1179LG20L27/0822 - XXXXXX