

SV

BLEPHADEMODEX®

Detta är en medicinteknisk produkt.
Läs bipacksedeln före användning.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

INDIKATION

BLEPHADEMODEX är en steril våtservett impregnerad med lotion för daglig rengöring av ögonlocken vid *Demodex*-infektion. Endast för användning på huden. Ska inte användas i ögat.

LÄMPLIG FÖR

Endast för vuxna.

KONTRAINDIKATIONER

Använd inte om du är allergisk mot något av innehållsämnen i BLEPHADEMODEX (se Produktbeskrivning).

BLEPHADEMODEX ska inte användas under graviditet eller amning utan rekommendation från läkare eftersom det saknas tillräckligt med data om användning vid graviditet och amning.

BLEPHADEMODEX ska inte användas hos barn utan rekommendation från läkare eftersom det saknas tillräckligt med data om användning hos barn.

PRODUKTBeskrivning

BLEPHADEMODEX är sterila servetter impregnerade med rengöringslotion. Rengöringslotionen innehåller: PEG-8, polysorbit 80, poloxamer 184, terpinen-4-ol, PEG-6-kapryl/kaprinsyra-glycerider (makrogol-6-glycerolkaprylokapat), natriumhyaluronat, dikaliumfosfat, kaliumdivätefosfat, renat vatten. BLEPHADEMODEX innehåller varken konserveringsmedel eller starka tvättaktiva ämnen. BLEPHADEMODEX har en stark doft på grund av dess komponenter. Doften försvinner inom några minuter.

Färgen på servetter kan variera. Detta är normalt på grund av de naturliga växtextrakten (terpinen-4-ol, renat extrakt från tetröolja) i rengöringslotionen som servetten är impregnerad med.

NYTTA, EGENSKAPER OCH FUNKTION

BLEPHADEMODEX rekommenderas:

- för daglig rengöring av ögonlocken vid *Demodex*-infektion,
- för symptomlindring vid infektion eller ögonlocksinfektion (blefarit) orsakad av *Demodex*.

Demodex är den vanligaste mikroskopiska parasiten som lever på huden. Vid en överväxt, dvs vid stora mängder av parasiten, kan symtom så som klåda, brännande känsla, ömma ögonlock, inflammation av kanten på ögonlocken samt känslan av skräp i ögonen förekomma. Förekomsten av cylindriska mjäll vid roten av ögonfransarna är en tydlig indikation på *Demodex*-infektion.

Demodex avlägsnas inte av vanliga produkter för daglig rengöring utan kräver specialutvecklade produkter.

BLEPHADEMODEX rengör och avlägsnar krustor, mjäll, orenheter och infektiösa ämnen från ögonlocken och ögonfransar. BLEPHADEMODEX lindrar symtomen förknippade med *Demodex*-infektion så som klåda, brännande känsla, torrhet och inflammation av kanten på ögonlocken. Den innehåller hyaluronsyra som är ett naturligt förekommande hudåterfuktande ämne som lugnar och återbildar känslig hud. BLEPHADEMODEX är väl tolererad.

Produkten är testad av ögonläkare.

REKOMMENDATIONER VID ANVÄNDNING

Behandling:

- Vid milda besvär/symtom: Använd en gång om dagen; på kvällen under 4 veckor.
- Vid medelsvåra till svåra besvär/symtom: Använd två gånger om dagen; morgon och kväll under 4 veckor.

Hälso- och sjukvårdspersonalen kan anpassa användningsfrekvensen och längden av behandlingsperioden beroende på symtomens svårighetsgrad.

Liksom med andra behandlingar av ögonlocksinfektion (blefarit) kan hälso- och sjukvårdspersonalen rekommendera samtidig användning av tåresättande ögondroppar. BLEPHADEMODEX är lätt att använda.

Om du använder kontaktlinser: Ta bort kontaktlinserna före användning av BLEPHADEMODEX.

Tvätta händerna noga före användning. Öppna påsen genom att riva av kanten (Bild 1) och veckla ut rengöringsservetten. Använd inte sax eller dylikt för att öppna påsen.



Bild 1: Öppning av påsen

Vira servetten runt toppen av pekfingeret. Stäng ögat och håll det stängt. Lägg fingret med servetten mot ögonlocket och massera försiktigt med små cirkulära rörelser för att rengöra basen av ögonfransarna (övre och nedre) och få bort krustor, mjäll och sekret.



Bild 2:

Rengöring av ögonlocken och fransarna

Upprepa behandlingen på det andra ögat med en ny servett.

BLEPHADEMODEX är inte oljig och ska inte sköljas av efter användning. Håll ögat stängt i 15 sekunder efter behandling.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Kontrollera att förpackningen är obruten innan du använder för första gången: använd endast om påsen är oöppnad.

Använd servetten bara en gång eftersom den vid återbruk kan ha mindre effekt och orsaka kontamination. Kontakta hälso- och sjukvårdspersonal om dina symtom inte blir bättre eller förvärras.

VARNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Undvik att få BLEPHADEMODEX i ögat. En brännande känsla kan upplevas om du får BLEPHADEMODEX i ögat. Om detta sker ska ögat sköljas med sterilt vatten eller saltlösning.

BIVERKNINGAR

Följande biverkning är rapporterad: brännande känsla efter användning. Om detta förekommer, ska kontaktlinsanvändare inte sätta in sina linser igen. Om du får någon biverkning eller upplever något oväntat efter att du använt denna produkt, tala med hälso- och sjukvårdspersonal och rapportera händelsen till den lokala distributören, tillverkaren eller den nationella hälsomyndigheten (se kontaktinformation i slutet

av bipacksedeln).

FÖRVARING OCH BORTSKAFFANDE

Förvaras mellan 8 °C och 25 °C. Produkten ska skyddas mot direkt solljus och fukt. Släng servetten direkt efter användning. Använd inte efter utgångsdatum som är angivet på påsen och yttre kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad och avser produkt i oöppnad förpackning som är korrekt förvarad. Produkten bör kasseras ansvarsfullt enligt gällande riktlinjer (påsen och våtservetten ska sorteras som hushållsavfall, den yttre kartongen och bipacksedeln kan återvinnas).

Bipacksedelns versionsnummer och revideringsdatum: Ver. 3 08/2020

Tillverkare:

Laboratoires Théa
12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2
Frankrike
www.laboratoires-thea.com
Avsnitt « Contact us »

Distributör:

Théa Nordic AB, Storgatan 55, 70363 Örebro
www.thea-nordic.com

Hälsomyndighet:

Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184, 104 30 Stockholm
Tel. 010-788 50 00
e-post: registrator@ivo.se – www.ivo.se
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
Tel: 018-17 46 00, fax: 018-50 31 15
e-post: meddev.central@mpa.se – www.lakemedelsverket.se

CE 0459

FÖRKLARING FÖR SYMBOLERNA PÅ FÖRPACKNINGEN

	Tillverkare		Batchnummer
	Tillverkningsdatum		Utgångsdatum
	Förvaringstemperatur		Steriliserad med strålning
	Medicinteknisk produkt		Läs bipacksedeln
	Engångsbruk		Använd inte om förpackningen är skadad
	Varning		

Théa